

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストリングワックス JMDN16189000

CSCワックスディスク

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストリングワックスとして使用する。

【形状・構造】

サイズ	色調
φ98×10mm	緑色
φ98×12mm	
φ98×14mm	
φ98×16mm	
φ98×18mm	
φ98×20mm	
φ98×22mm	
φ98×25mm	



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

外国製造業者: Shenzhen Xiangtong Co., Ltd.
外国製造業者国名: 中華人民共和国

製造販売業者: 株式会社CARESソリューションセンター
〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-5 REID-C南品川ビル4階
連絡先: 0120-03-2280

成分

パラフィンワックス、着色染料

原理

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットにて切削加工を行う、歯科鑄造物のろう型に用いる。

【使用方法】

・使用する機械

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

・使用方法

本製品をCAD/CAM加工機に装着し、切削加工を行う。
切削加工後、通法に従い修正、埋没、鑄造を行う。

【操作方法】

詳細な使用方法については、機器に付属の取扱説明書等を参照すること。

- (1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける
- (2) 適切なプログラミングで切削を行う

【使用上の注意】

- (1) 本材は、過度の加熱でしないこと
- (2) 本材は、過熱を要するので使用の際は火傷に注意すること
- (3) 再溶解してして使用しないこと

【保管方法】

- ・高温、多湿の場所を避けて保管すること
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること